

TCA dent 35% Triklorättiksyra

Beredning för lokal kauterisering av slemhinnor
Vänligen läs igenom följande anvisningar före användning
Endast avsedd för dental användning

SAMMANSÄTTNING: Triklorättiksyra 35%, Ph Eur renat vatten, arom

ANVÄNDNINGSIKATIONER

TCA dent används för att kauterisera lokala patologiska förändringar och mindre blödningar i munhålan. Läkningseffekten av denna beredning erhålls genom kemisk koagulation av patologiskt förändrad vävnad. Produkten förbättrar läkningen av granulerade lesioner.



BRUKSANVISNING

1. Torka det påverkade området noggrant och isolera det (t ex med vaselin).
2. Fukta en bifogad applikator med beredningen, avlägsna överskott. Gnugga förändringen tills den blir vit.
3. Skölj rent med vatten.

WARNING! Spola noggrant bort beredningen då den annars påverkar stelningen av avtrycksmaterial.

Om lesionerna inte försvinner efter första applikationstillfället, upprepa proceduren flera gånger var 2-4 vecka tills de försvunnit helt. Denna produkt kan användas flera gånger men applikatorn är avsedd för engångsanvändning. Upprepad användning av applikatorn kan ge risk för sekundärinfektion.

KONTRAINDIKATIONER

Använd inte på patienter med allergi mot ämnen i beredningen. Använd inte på barn.

OBSERVANDA

Applicera bara på affekterat område.

Denna produkt kan orsaka ögonirritation. I händelse av kontakt spola med rikligt med vatten.

Vid förtäring framkalla inte kräkning och drick rikliga mängder med vatten. Kontakta läkare omedelbart. Använd handskar, skyddsglasögon och skyddskläder vid arbete med denna produkt.

FÖRVARING

Förvara i tätt försluten behållare under 25°C.

Förvara oåtkomligt för barn.

Utgångsdatum finns angivet direkt på förpackningen.

Efter öppnandet av förpackningen förändras inte hållbarhetsdatum under förutsättning att den försluts väl efter varje användningstillfälle.

AVFALLSHANTERING

Se lokala föreskrifter angående hantering av avfall. I frånvaro av sådana se nationella eller regionala föreskrifter för avfallshantering.

FÖRPACKNINGSTYPER

Produkten finns i 10ml flaska med droppipett tillsammans med en-gångsapplikatorer.